

	HIGIENAÇÃO E PREPARO DO KIT DE NEBULIZAÇÃO Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos		POPCCIH-07	
			Data de criação: 25/06/2017 Data de Revisão: 27/02/2025	
			Nº Revisão	Página
		01	1 de 3	

1. OBJETIVO

Garantir a correta higienização e preparo do kit de nebulização, promovendo a segurança do paciente e prevenindo infecções hospitalares.

2. ABRANGÊNCIA

Aplicável a todos os profissionais de enfermagem do Hospital Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos envolvidos no processo de nebulização de pacientes.

3. DEFINIÇÕES

- **Kit Nebulização:** Conjunto de materiais utilizados para administração de medicamentos por inalação.
- **Desinfecção:** Processo de eliminação de microrganismos patogênicos, exceto esporos bacterianos, por meio de agentes químicos.
- **Hipoclorito de sódio a 1%:** Solução utilizada para desinfecção de materiais.

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Kit nebulização
- Soro fisiológico
- Fonte de oxigênio/ar comprimido
- Fluxômetro
- Medicação prescrita
- Bandeja
- Par de luvas de procedimento
- Etiqueta de identificação
- Sistema de infusão

5. PROCEDIMENTOS

5.1 Higienização do Material

1. Higienizar as mãos conforme protocolo institucional.
2. Calçar luvas de procedimento.
3. Reunir todo o material necessário.
4. Lavar o material utilizando água e sabão com pano ou esponja destinada a esse fim.
5. Enxaguar abundantemente.
6. Imergir completamente o artigo em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos, evitando a formação de bolhas.

	HIGIENAÇÃO E PREPARO DO KIT DE NEBULIZAÇÃO Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos	POPCCIH-07	
		Data de criação: 25/06/2017	
		Data de Revisão: 27/02/2025	
		Nº Revisão 01	Página 2 de 3

7. Respeitar o tempo de exposição e trocar a solução a cada 24 horas, mantendo o recipiente tampado.
8. Identificar a solução com data, horário e assinatura a cada troca.
9. Enxaguar abundantemente os artigos para remover resíduos do produto.
10. Secar os artigos utilizando pano limpo e seco.
11. Embalar o kit completo em saco plástico.
12. Datar e assinar a embalagem de cada kit.
13. Armazenar o material em recipiente adequado, fechado.
14. Estocar em local limpo, livre de poeira e separado de outros materiais.

5.2 Cuidados Especiais

- É proibida a estocagem próxima a pias, água ou tubos de drenagem.
- Nebulizadores e umidificadores devem passar pelo processo de higienização após cada uso.

6. REGISTROS

- Registrar o procedimento no prontuário do paciente, incluindo data, horário, tipo de material utilizado e assinatura do profissional responsável.
- Controle de esterilização das máscaras (equipamentos) nº?.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bare, B.G.; Suddarth, D.S. *Brunner - Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica*. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
2. Silva, L.D.; Pereira, S.R.M.; Mesquita, A.M.F. *Procedimentos de Enfermagem: Semiotécnica para o Cuidado*. Rio de Janeiro: Medsi, 2005.

8. CONTROLE HISTÓRICO

Controle Histórico				
Revisão	Data	Elaboração /enfermeiro(a)	Verificação/enfermeiro(a) /farmacêutico(a)	Aprovação/ Diretor(a)
00	25/06/2017	Sebastião?	Jayme	Amanda
01	27/02/2025	Sebastião José dos Santos	Airam Niere da Silva Barbosa	Joice Lima Rodrigues

	HIGIENAÇÃO E PREPARO DO KIT DE NEBULIZAÇÃO Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos	POPCCIH-07	
		Data de criação: 25/06/2017 Data de Revisão: 27/02/2025	
		Nº Revisão 01	Página 3 de 3

Revisão	Data	Descrição da Alteração
00	25/06/2017	Documento original criado
01	27/02/2025	Atualização da estrutura do POP, com reorganização dos tópicos e correção de títulos e identificação (ID). Ajuste nas responsabilidades e detalhamento dos procedimentos, além da inclusão de novos cuidados especiais e referências bibliográficas atualizadas.

Observações: Este POP deverá ser revisado periodicamente para adequação às normativas vigentes e boas práticas assistenciais a cada 2 anos ou quando houver mudança significativas.