	<p align="center">Higienização e Preparo do Kit de Nebulização</p> <p align="center">Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos</p>	POP-CCIH -10	
		Data de criação: 20/05/2017	
		Data de Revisão: 28/02/2025	
		Nº Revisão	Página
		01	1 de 3

1. OBJETIVO

Estabelecer um procedimento padronizado para higienização e preparo do kit de nebulização, garantindo a segurança do paciente e a qualidade dos materiais utilizados.

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica a toda a equipe de enfermagem responsável pela higienização e preparo do kit de nebulização no Hospital Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos.

3. DEFINIÇÕES

Materiais Necessários:

- KIT NEBULIZAÇÃO
- SORO FISIOLÓGICO
- FONTE O2 / AR COMPRIMIDO
- FLUXÔMETRO
- MEDICAÇÃO PRESCRITA
- BANDEJA
- PAR DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- SISTEMA DE INFUSÃO

4. REGISTROS


Registrar o procedimento no prontuário do paciente **(tem número esses prontuários?)**, garantindo a rastreabilidade da higienização e do uso do kit.

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A supervisão do cumprimento do procedimento deve ser realizada periodicamente pela equipe de enfermagem, garantindo a conformidade com as boas práticas de prevenção de infecções hospitalares.

6. PROCEDIMENTO

1. Higienizar as mãos;
2. Calçar luvas de procedimento;
3. Reunir o material;

	<p align="center">Higienização e Preparo do Kit de Nebulização</p> <p align="center">Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos</p>	POP-CCIH -10	
		Data de criação: 20/05/2017	
		Data de Revisão: 28/02/2025	
		Nº Revisão	Página
		01	2 de 3


4. Lavar o material utilizando água e sabão com o pano ou esponja destinada a esse fim;
5. Enxaguar abundantemente;
6. Imergir completamente o artigo, evitando formação de bolhas, em solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos;
7. Observar e respeitar o tempo de exposição indicado da solução, que deve ser trocada a cada 24 horas, mantendo o recipiente tampado;
8. Identificar com data, horário e assinatura a solução de hipoclorito a cada troca;
9. Enxaguar em abundância os artigos, para eliminar os resíduos do produto utilizado;
10. Secar os artigos utilizando pano limpo e seco;
11. Embalar o kit completo em saco plástico;
12. Datar e assinar a embalagem de cada kit;
13. Condicionar o artigo em recipiente ou invólucro adequado, fechado;
14. Estocar o material em área separada, limpa, livre de poeiras, em armários fechados.

Cuidados Especiais:

- É proibida a estocagem próximo às pias, água ou tubos de drenagem.
- Nebulizadores e umidificadores deverão sofrer este processo sempre após o uso.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BARE, B.G.; SUDDARTH, D.S. *Brunner - Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica*. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
2. SILVA, L.D.; PEREIRA, S.R.M.; MESQUITA, A.M.F. *Procedimentos de enfermagem: Semiotécnica para o cuidado*. Rio de Janeiro: Medsi, 2005.

	<p align="center">Higienização e Preparo do Kit de Nebulização</p> <p align="center">Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos</p>	POP-CCIH -10	
		Data de criação: 20/05/2017	
		Data de Revisão: 28/02/2025	
		Nº Revisão	Página
		01	3 de 3

8. CONTROLE HISTÓRICO

Controle Histórico				
Revisão	Data	Elaboração /enfermeiro(a)	Verificação/enfermeiro(a) /farmacêutico(a)	Aprovação/ Diretor(a)
00	20/05/2017	Sebastião José dos Santos	Jayme	Amanda
01	28/02/2025	Sebastião José dos Santos	Airam Niere da Silva Barbosa	Joice Lima Rodrigues

Revisão	Data	Descrição da Alteração
00	20/05/2017	Documento original criado
01	28/02/2025	Inclusão de registros no prontuário do paciente para garantir rastreabilidade da higienização e do uso do kit. Adição da identificação com data, horário e assinatura na solução de hipoclorito a cada troca. Definição de condições específicas para a estocagem do material em área separada, limpa e livre de poeiras. Reforço da proibição de estocagem próxima às pias, água ou tubos de drenagem

Observações: Este POP deverá ser revisado periodicamente para adequação às normativas vigentes e boas práticas assistenciais a **cada 2 ano** ou quando houver mudança significativas.